

AirFit™ F30i

## Anleitung zum Anlegen der AirFit F30i



1 Lösen Sie beide Magnetclips mit einer leichten Drehbewegung vom Rahmen.



2 Positionieren Sie das Maskenkissen unter Ihrer Nase, sodass es bequem sitzt. Ziehen Sie das Kopfband und den Maskenrahmen über Ihren Kopf. Das ResMed Logo auf dem Kopfband muss dabei nach oben weisen.



3 Führen Sie die unteren Kopfbänder unter Ihren Ohren entlang und befestigen Sie die Magnetclips am Maskenrahmenanschluss.



4 Öffnen Sie die Verschlüsse an den oberen Kopfbändern und ziehen Sie diese gleichmäßig an.



5 Wiederholen Sie den Vorgang mit den unteren Kopfbändern. Stellen Sie sicher, dass die Maske bequem sitzt.



6 Lösen Sie das Kniestück durch Drücken auf die seitlichen Knöpfe vom Rahmen. Verbinden Sie Geräteschlauch und Kniestück. Bringen Sie das Kniestück wieder am Rahmen an.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



### Zusätzliche Optionen

Bei längerem Haar empfehlen wir, das Haar hinten über das untere Kopfband zu führen. Wenn die Haare zum Pferdeschwanz gebunden sind, sollte der Ansatz weit genug oben sein, sodass er bequem über dem unteren Kopfband sitzt.

Weitere Anleitungen sowie umfassende Informationen zu Verwendungszweck und Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



ResMed

AirFit™ F30i  
Full face mask



**Für die aktiven Schläfer,**  
die ins Bett gehen, wenn sie möchten,  
zwischen durch aufstehen,  
sich hin und her drehen  
und morgens aus dem Bett springen,  
um den neuen Tag zu beginnen.



## Freiheit für Bewegung

Die neue AirFit™ F30i: Eine Full Face Maske mit Schlauchanschluss oben am Kopf, mit der sich der Patient im Bett frei bewegen, in jeder Position schlafen<sup>1</sup> und ganz bequem lesen und entspannen kann. Das ultrakompakte, vorgeformte Maskenkissen schmiegt sich bequem unter der Nase an und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.<sup>1</sup>

Die AirFit F30i vereint funktionales, minimalistisches Design mit echter Bewegungsfreiheit.



<sup>1</sup> ResMed external clinical study of 51 current full face CPAP mask users, conducted between 24/10/2018 - 20/11/2018, 2018 Data on file; ID A4484728.  
<sup>2</sup> Wiggins A. et al., Impact of a New Nasal Pillows Mask on Patients' Acceptance, Compliance, and Willingness to Remain on CPAP Therapy. Sleep Disord, 2016; 2016; p. 6713236.  
<sup>3</sup> Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist unter folgenden Bedingungen kontraindiziert: hämorrhagischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas oder Metallsplitters in einem oder beiden Augen.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de  
AirFit ist eine Marke von ResMed Pty Ltd. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2020 ResMed Pty Ltd., Art.-Nr. 10111867/2 (auf Grundlage von 10111770/1 2019-12), Obj.-ID. C280089 - 2 - 02 20

ResMed.com/AirFit30

ResMed.com/AirFit30


## Ein sanfter, behutsamer Ansatz

Die AirFit F30i wurde entwickelt, um typische Therapiebarrieren bei Full Face Masken zu überwinden. Platzangst, Unbequemlichkeit, Unbehagen und das eigene Aussehen mit der Maske<sup>2</sup>: Diesen Herausforderungen begegnet die Maske F30i mit ihrem speziellem Design.




## Ein angenehmer Therapieeinstieg

Die AirFit F30i Maske bietet beste Voraussetzungen, um Neupatienten den Einstieg in die Schlafapnoe-Therapie zu erleichtern. Im Mittelpunkt des Designs steht die physische, visuelle und psychische Freiheit – dies fördert den natürlichen Schlaf und trägt wesentlich zur Akzeptanz der Maske bei.

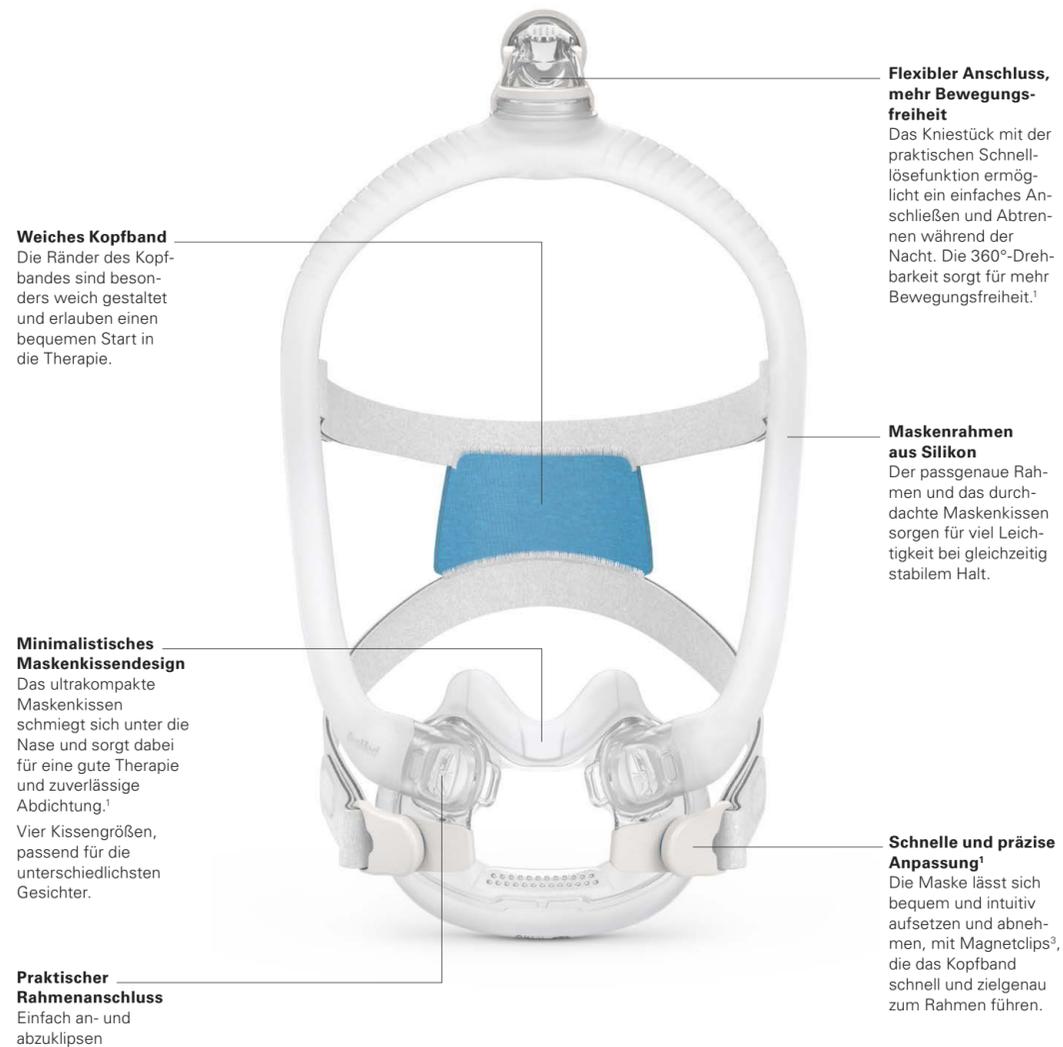

## Artikelnummern

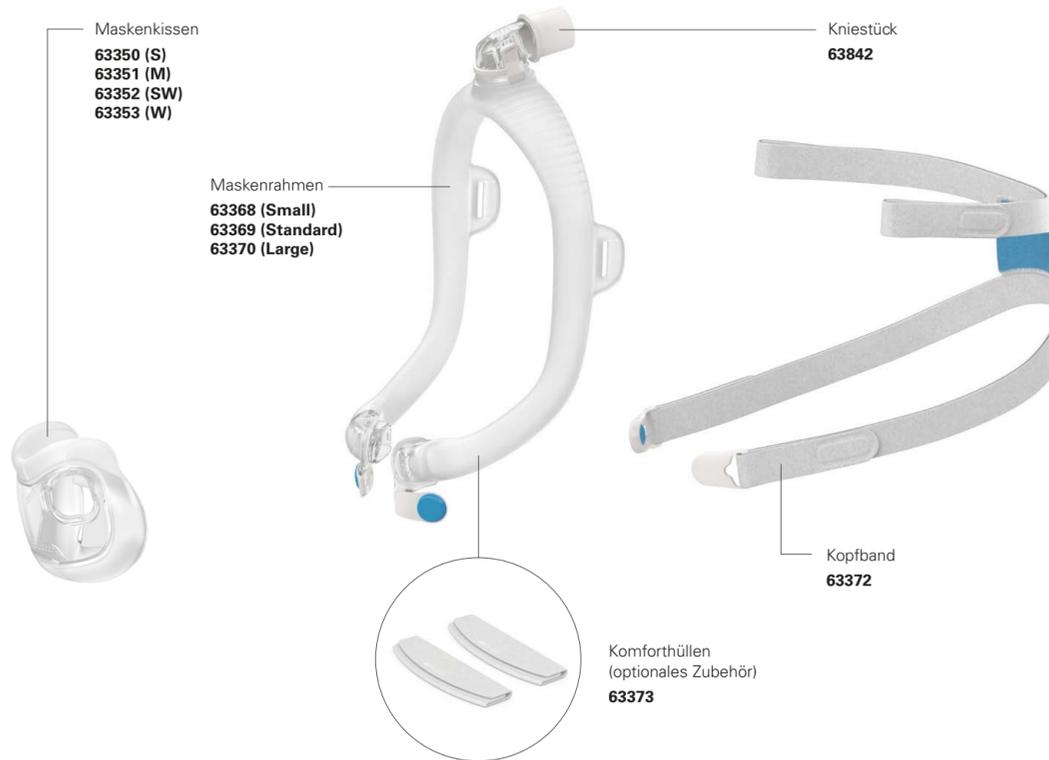

AirFit F30i Maskensysteme			
Größe	Small Kissen / Small Rahmen	Medium Kissen / Standard Rahmen	Wide Kissen / Standard Rahmen
Artikel	63310	63312	63313

## Tipps zur Größenbestimmung

Die Maskenkissen der AirFit F30i sind in vier austauschbaren Größen erhältlich: Small, Medium, Small Wide und Wide.

Der Maskenrahmen ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Standard und Large. Dank des modularen Aufbaus der AirFit F30i lassen sich alle Kissengrößen mühelos in die verschiedenen Rahmen einrasten, sodass sie für mehr Flexibilität völlig problemlos ausgewechselt werden können. ResMed empfiehlt, zur Abschätzung der für den Patienten am besten geeigneten Maskengröße die Anpass-Schablone zu verwenden.

